



Brukerveiledning DS-kanyleavtager.

1. Klargjort sprøyte i hvilestilling det lille hull i DS-kanyleavtageren.
2. Beskyttelsehylse settes tilbake i det lille hull når sprøyten skal klargjøres for injeksjon.
3. Etter injeksjon settes sprøyten i hvilestilling i beskyttelsehylse.
4. Når injeksjoner er avsluttet skal sprøyten recappes ved å trykke sprøyten ned i beskyttelsehylsen til du kjenner motstand.
5. Fjern karpyle/ampull når sprøyten står i det lille hullet i DS-kanyleavtageren.
6. Flytt den recappede sprøyten over i det store hull og trykk ned til den stopper, samtidig som du plasserer sprøyten i venstre hånd med kanyleavtakeren vendt opp.
7. Plasser høyre tommel og pekefinger på beskyttelsehylsen og drei mot urviseren til kanylen løsner fra sprøyte.
8. Hold kanyleavtageren over hull i gul oppbevaringsbeholder og trykk ut kanylekappen med et raskt fast trykk med tommelfinger slik at kanylen faller ned i beholderen.

