

TS Protect - flergångsvisir



TS Protect är ett flergångsvisir som kan desinficeras och återanvändas. Sänk ner i eller torka av med desinficeringsmedel. Skyddsplasten framtill kan bytas ut vid behov. Hålad ersättningsplast kan beställas från oss eller så kan ni själva håla OH-film för ersättning. Hålguide medföljer. Visiret kan användas med de flesta luppår under – däremot inte luppår med lampa.

Monteringsanvisning

Placera skyddsplastens hål över peggarna på visirhållaren och tryck fast plasten.

Rengöringsanvisning

1. Ta försiktigt loss skyddsplasten och torka av den med desinficeringsmedel.
2. Torka av eller sänk ner visirhållaren i desinficeringsmedel.
3. Återmontera rengjord skyddsplast alternativt byt till ny.