



Varios Combi Pro

Daglig vedlikehold

- Start maskinen hver morgen. Knapp bak.
-VIKTIG: Subgingivalt (PERIO/GLYCIN) pulver og supragingivalt (KALSIUM KARBONAT) pulver SKAL i hver sin pulverbeholder! Beholderne har forskjellig trykk.
- Etter hver Airpolish behandling: Legg håndstykket i en vask, kopp eller bolle, legg noe over som beskytter mot aerosoler. Trykk «AC»  i 3-4 sek. (touchknapp foran, høyre side: Auto Cleaning). Slangen (og håndstykkene) blåses, skylles/rensens innvendig, tar 45 sekunder, en slange om gangen (for IPIEZO, kun etter bruk av kjemikalier i beholderen). -Trykk «AC» en gang til, 1-2 sekunder, tømmer da pulverbeholder for trykk. Gjentas **alltid** ved bytte av pulverbeholder, eller ved påfyll av pulver. Knapp på beholderen holdes inne for å løfte den opp.
- Vask håndstykker i desinfektor (helst i stativ for gjennomspyling) tørk godt og autoklavér mellom hver pasient (ref. retningslinjer om anbefalt smittevern 2018). DAC er nå også mulig med rette adapter. Airpolish/periopolish håndstykker kan deles i to og gå i ultralydbad.
- KVELD/HELG: Kjør «AC» på alle 3 slanger (45 sek.pr slange). Kjør noen ekstra ganger før helg og ferie. Pulverbeholder tas av, tøm ut pulver og blås med treveissprøyte. Børst vekk alt løst pulver på maskinen og overgangen til håndstykkene, aldri fukt her. Kjør et par ganger uten pulver: kjør 10 sek. vent 10 sek. kjør 10 sekunder.
- Slå så av maskinen.
- Sprit av maskinen. Husk smøre o-ringer ofte og bytte de hver 3 mnd.

*Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye og å følge anbefalt vedlikehold.

Lykke til!

Se video av vedlikehold her: <https://www.nsk-dental.com/support/clinical-case/>
Kontakt din dentalleverandør ved behov for hjelp, ekstrautstyr som o-ringer eller annet.

Kontakte Linda Kjølstadmyr:

linda.kjolstadmyr@nsk-nordic.com / 92993799

Følg [Dentalsupport Norge](#) på Facebook og Instagram

