


Manual DUC23

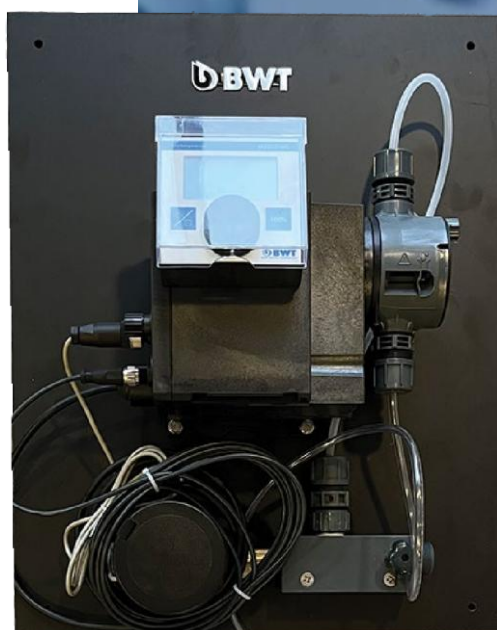

1 Introduksjon til DUC23

BWT DUC23 (art.nr.: 421700000) er et BWT Unit CleanR 2000 (art.nr.: 701957041) distribusjonssystem for tannhelseindustrien, som sørger for at vannet som prosesseres ikke inneholder skadelige mikroorganismer. Systemet opererer med pulssignaler som gis fra vannmåleren. Vannmåleren registrerer 10 impulser per liter vann som strømmer gjennom den. Derfor anbefaler vi følgende standardinnstillinger for systemet, forutsatt at vannet som brukes før doseringen er omvendt osmosevann.


0,05 ml/puls: gir en dosering på 1 ppm, og er en standard, forebyggende installasjon, uten tidligere eller nåværende problemer med legionella i det eksisterende rørsystemet.

0,1-0,2 ml/puls: gir en dosering mellom 2 og 4 ppm. Installasjon for systemer med eksisterende legionellautfordringer.

Vi anbefaler en dosering mellom 1-2 ppm. Vær oppmerksom på at disse parameterne kan være nødvendig å justere i forbindelse med de ukentlige vanntestene. Disse anbefalingene gjelder forutsatt at vannet som brukes før doseringen er omvendt osmosevann. Hvis vannet er ubehandlet eller ikke filtrert, vil doseringen måtte justeres. For mer informasjon, vennligst les kapittelet om vanntesting.

2 Innstillinger og generell informasjon


Under innstillingsmenyen, kan mange parametere endres. De viktigste innstillingene er signal, språk og dosering. Hvis det oppstår problemer med enheten, sørg for at signalet "pulse" alltid er valgt. Dette finnes i innstillingsmenyen under driftsmodus.

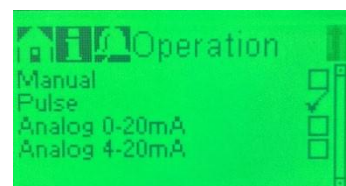

Det er avgjørende å sikre at BWT Unit CleanR 2000 alltid blir distribuert inn i systemet. Derfor viser DUC23-skjermen alltid en farge basert på det nåværende nivået i beholderen. Denne funksjonen vises med 4 forskjellige farger, og gjør det lettere å planlegge neste påfyll av BWT Unit CleanR 2000.

Blå: Beholderens innhold er høyt, og systemet er satt på pause.	Grønn: Beholderens innhold er høyt, og systemet kjører som normalt.	Gul: Beholderens innhold er rundt 1/2, og utskifting bør planlegges.	Rød: Beholderens innhold er rundt 1/3, og må byttes snart.
Ok	Ok	Warning	Alarm

Etter oppstart, service eller en lengre periode uten bruk, kan luft ha kommet inn i systemet. Når det er luft i systemet, klarer ikke pumpen å presse vannet gjennom rørene. Luft i systemet kan fjernes ved å vri på luftventilen som vist på bildet. Hold deretter inne 100 %-knappen til luft og vann kommer ut gjennom luftutløpet i pumpen. Når det kommer kun vann, lukk ventilen ved å vri den igjen.

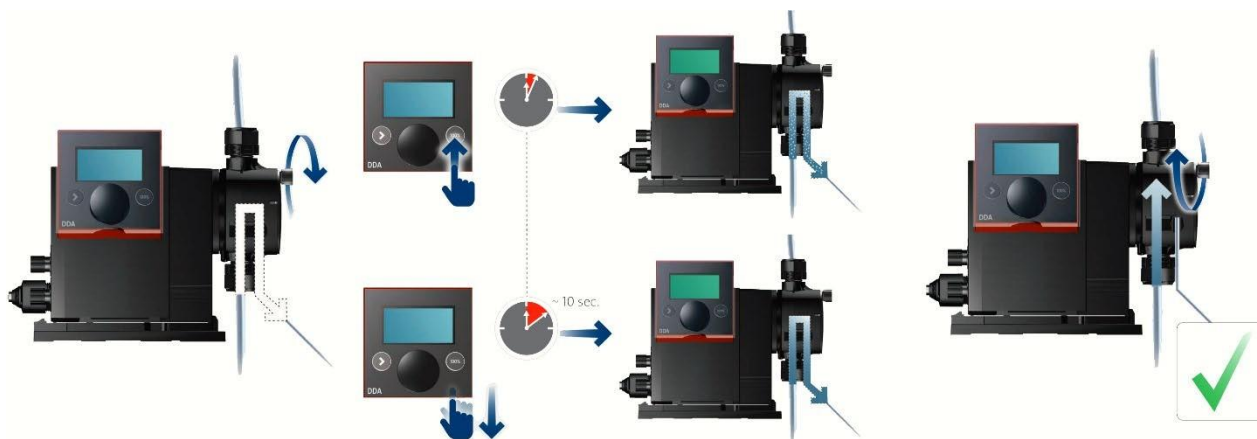

3 Måling av vannkvalitet

For å sikre riktig vannkvalitet og at beholderen ikke er tom, bør det utføres ukentlige vanntester på tannlegestolene. Til dette formålet anbefaler vi BWT "free chlorine strips" (701978030).

Målingene bør alltid tas på samme tidspunkt på dagen. Vi anbefaler å teste på ettermiddagen, for å oppnå mest mulig nøyaktige resultater.

Registrer de målte verdiene i ppm inn i skjemaet.

Vi anbefaler at målt resultat er minst 0,2 ppm.

Dersom målingene er lavere enn anbefalt, juster doseringen i henhold til kapittel 1.

Hvis doseringen fortsatt ikke ligger innenfor de anbefalte grensene, vennligst kontakt din BWT-forhandler.

Sett et minustegn (-) for målinger uten fargeendring, og husk å notere i skjemaet når BWT Unit CleanR 2000-beholderen byttes ut.



4 Sikkerhet

Ved vedlikehold av BWT DUC23, er det viktig å håndtere utstyret med forsiktighet.

Vennligst konsulter sikkerhetsdatabladet dersom du har bekymringer knyttet til stoffet BWT Unit CleanR 2000.

Det anbefales å alltid koble fra enheten før vedlikehold utføres, for å unngå risiko for elektrisk støt.

